

Handling




1. Inhalt

In der Kartonverpackung enthalten: Implantat in Kugelverpackung mit passendem Healing Cap.


Wichtig!

Prüfen Sie die gewünschten Implantat-Dimensionen vor dem Öffnen der Packung.

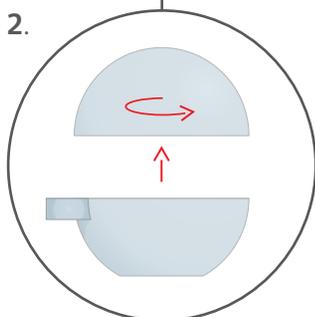


2. Kugel öffnen

Kugel durch Drehbewegung öffnen.

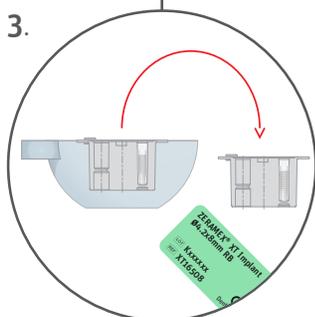


3. Entnehmen

Sekundärblister (keimarm) und Patienten-Etiketten aus Kugel nehmen.

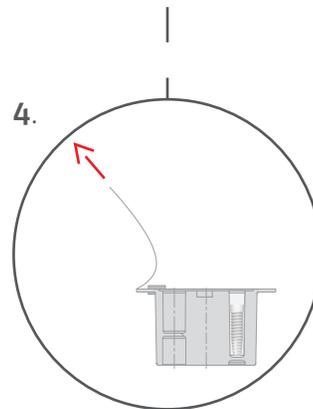


4. Blister öffnen

Verschluss kurz vor Verwendung öffnen (Innenseite steril).

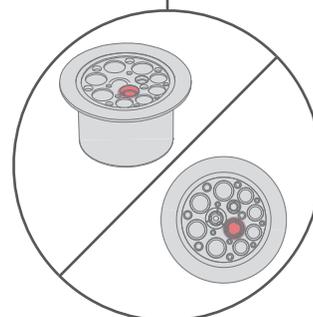

Wichtig!

Ebenfalls im sterilen Sekundärblister in der dafür vorgesehenen Kavität enthalten, ist das zum Implantat passende Healing Cap.

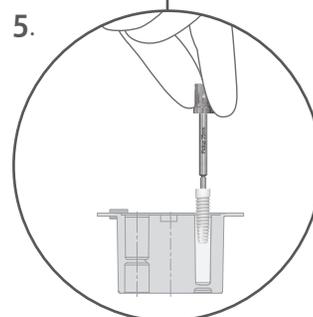

5. Implantat aufnehmen

Implantat mit Hilfe des Pickup (im Ratchet Adapter eingebracht) aufnehmen (im Vierkant einrasten). Es wird empfohlen, das Healing Cap auf den sterilen Bereich auszubringen und mit einem Prothetenschlüssel oder Pickup aufzunehmen.

Benötigtes Material

Pickup (XT36620/XT36625),
Ratchet Adapter Unit Short (P48932)