

Chirurgische Phase

XT

Bohrprotokoll ø4,2 mm RB



Implantat Beispiel

Regular ø4,2 x 8 mm

RB
ø 4.2 mm

14 mm

12 mm

10 mm

1,6 mm Kragenhöhe

Enossaltiefe 8 mm

1 mm

Rosedrill ø2,3 mm
max. 800 U/min

Zeradrill Pilot ø2,3 mm
max. 800 U/min

Zeradrill S8 (Small 8 mm)
max. 700 U/min

Zeradrill R8 (Regular 8 mm)
max. 600 U/min

Optional bei hartem Knochen
Zeradrill Extension Regular
max. 600 U/min

Zeratap Regular ø4,2 mm
max. 15 U/min

Zeramex XT RB
ø4,2 mm x 8 mm

Beachten: Optional kann das Implantat auch 0,6 mm suprakrestal (statt 1,6 mm) gesetzt werden. Hierzu muss mit dem Bohrer und Gewindeschneider 1 mm tiefer gebohrt werden.

Enossal ø4,2 mm

RB
ø 4.2 mm

Wichtig!

Bei Implantaten ø4,2 mm Drehmoment von 45 Ncm nicht überschreiten.

Achtung!

Den Gewindeschneider entsprechend der Knochenqualität einsetzen.