

# Chirurgische Phase

XT

## Bohrprotokoll ø5,5 mm WB



### Implantat Beispiel

Wide ø5,5 × 8 mm

WB  
ø 5.5 mm

14 mm

12 mm

10 mm

**1,6 mm Kragenhöhe**

Enossaltiefe 8 mm

1 mm

Rosedrill ø2,3 mm  
max. 800 U/min

Zeradrill Pilot ø2,3 mm  
max. 800 U/min

Zeradrill S8 (Small 8 mm)  
max. 700 U/min

Zeradrill R8 (Regular 8 mm)  
max. 600 U/min

Zeradrill W8 (Wide 8 mm)  
max. 500 U/min

**Optional bei hartem Knochen**  
Zeradrill Extension Wide  
max. 500 U/min

Zeratap Wide ø5.5 mm  
max. 15 U/min

Zeramex XT WB  
ø5,5 mm x 8 mm

**Beachten:** Optional kann das Implantat auch 0,6 mm suprakrestal (statt 1,6 mm) gesetzt werden. Hierzu muss mit dem Bohrer und Gewindeschneider 1 mm tiefer gebohrt werden.

Enossal ø5,5 mm

WB  
ø 5.5 mm

### Wichtig!

Bei Implantaten ø5,5 mm Drehmoment von 45 Ncm nicht überschreiten.

### Achtung!

Den Gewindeschneider entsprechend der Knochenqualität einsetzen.